

KORT VEJLEDNING VIO® 50/100 C


! Den korte vejledning erstatter ikke er instruktionen og brugsanvisningen! Den korte vejledning indeholder ikke sikkerhedsanvisninger. Gør dig fortrolig med sikkerhedsanvisninger i brugsanvisningerne.

Nødvendige betjeningstrin


1 Tænd apparat



2 Bekræft blinkende indstillinger med vilkårlig knap


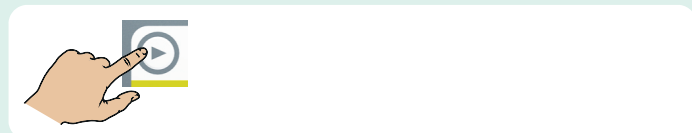


3 Skift program ved behov

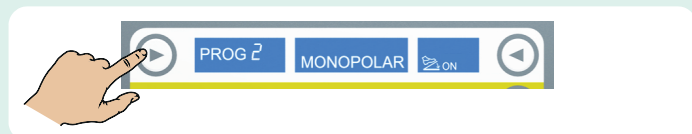


4 Kontrollér af indstillinger

Kontrollér indstillingerne for de anvendte instrumentbøsninger ved at trykke på deres fokus-knapper efter hinanden.

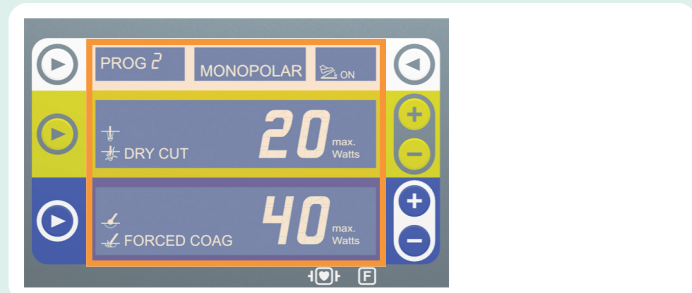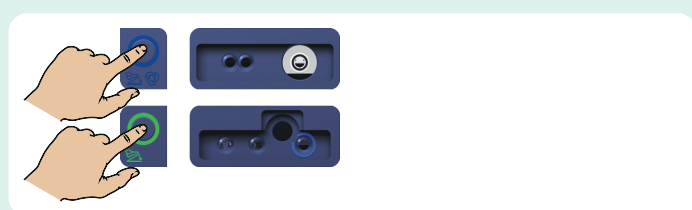

5 Påsætning og tilslutning af neutralelektrode


Anvend kun et monopolar instrument.

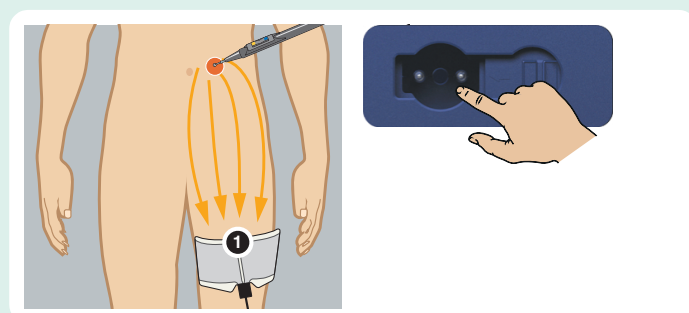

Neutralelektrodens lange kant (1) skal pege mod operationsfeltet.

6 Overvåg neutralelektrode


Efter påsætningen og under operationen.

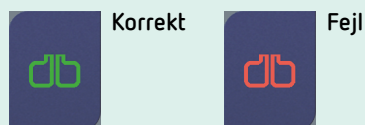

Kontrollér ved det røde neutralelektrodesymbol:

- Er neutralelektroden forbundet korrekt med apparatet?
- Peger neutralelektrodens lange kant mod operationsfeltet?
- Har neutralelektroden tilstrækkelig kontakt med huden?

7 Tilslutning af instrumenter

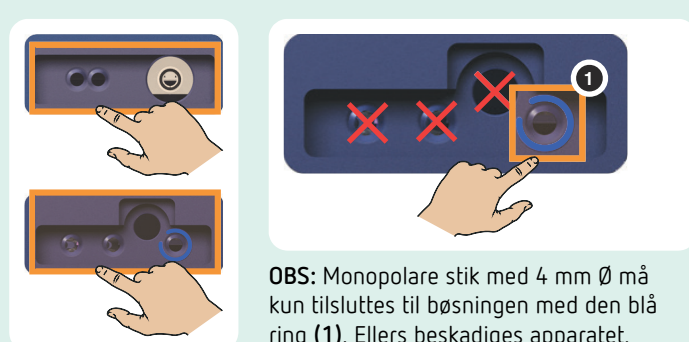


OBS: Monopolare stik med 4 mm Ø må kun tilsluttes til bøsningen med den blå ring (1). Ellers beskadiges apparatet.

Valgfrie betjeningstrin

8 Ændr modus




9 Ændr ydelsesbegrænsning

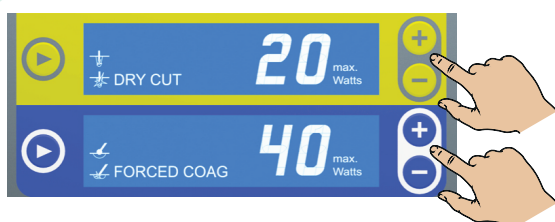

10 Vælg bøsning (f.eks. bipolar bøsning)



11 Tilordn den valgte bøsning til fodkontakt eller AUTO START

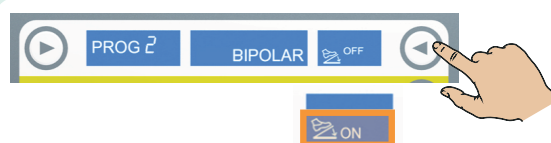

Kun VIO 100 C, bipolar bøsning: Ved at trykke på den øverste højre knap igen kan du tilordne AUTO START til bøsningen:

